

schülke →



Kasdieniniam siurbimo sistemų ir amalgamos separatorių valymui ir dezinfekcijai

aspirmatic®

Mūsų plusai

- tinka visiems amalgamos separatoriams (pvz. Dürr, Metasys)
- tinka visoms odontologinėms kėdėms (pvz. Sironna, KaVo, Castellini, ir t. t.)
- neputoja
- gaivus kvapas
- patikrino ir patvirtinto naudojimui Sirona
- ekonomiškas

Panaudojimo sritys

Kasdieniniam siurbimo sistemų ir amalgamos separatorių valymui ir dezinfekcijai .

Produkto aprašymas

Aspirmatic® (valymas ir dezinfekcija) ir Aspirmatic® cleaner (specialus valiklis) produktai puikiai valo, dezinfekuoja ir užtikrina aukščiausio lygio higieną. Aspirmatic® system specialus dozavimo indas užtikrina lengvą ir patogų kasdieninį darbą.

Naudojimo instrukcija

Naudoti vieną arba du kartus per dieną. Geriausiam rezultatui pasiekti naudojama du kartus per dieną, pasitelkiant į pagalbą Aspirmatic® dozavimo sistemą pabaigus darbą su pacientu. Darbinis tirpalas daromas įpilant 40 ml Aspirmatic® į 1960 ml kambario temperatūros vandenį. Kad darbinis tirpalas neputotų, visada į dozavimo sistemą, visų pirma pilkite vandenį ir tik tada 40 ml Aspirmatic®.

1,5 litro darbinio tirpalo susurbkite per siurbimo žarnes, likusius 0,5 litro supilkite į spjaudyklę. Palikite minimum 30

minučių arba per naktį. Prieš pradėdant darbą būtinai praskalaukite siurbimo sistemą su 1 litru vandens.

Mikrobiologinis efektyvumas

Efektyvumas	Koncentracija	Kontakto laikas
baktericidinis <i>Pagal VAH</i>	2 % (20 ml/l)	30 min
Mieliagybiai <i>Pagal VAH</i>	2 % (20 ml/l)	30 min
inkapsuluoti virusai (įsk. HIV, HBV, HCV) Pagal RKI gaires	2 % (20 ml/l)	30 min



Informacija apie produktą

Sudėtis:

100 g Aspirmatic® yra: 7,5 g dioctyl dimetyl amonium chlorido. < 5 % nejoninės aktyviosios paviršiaus medžiagos, < 5 % muilai, aromatinės medžiagos.

Cheminės ir fizikinės savybės

Spalva	melsva
Tankis	0,99 g / cm ³ / 20 °C
Užsiliepsnojimo temp.	Netaikoma
Forma	skystis
pH	6,5 - 7,5 / 20 °C / koncentratas
Klampumas	netaikoma

Specialūs patarimai

Prieš naudojimą visada perskaitykite naudojimo instrukciją. Dėvėkite pirštines. Nenaudokite jei priemonės galiojimo laikas pasibaigęs. Nemaišykite aspirmatic® ir Aspirmatic® cleaner tarpusavyje, bei su kitomis priemonėmis.

Talpos

Produktas	Antrinė pakuotė	Kodas
aspirmatic® 2 l	5 vnt./dėžėje	150106

Priedai

Priedai	Kodas
aspirmatic® sistema	183701
menzūra 500 ml	136101
menzūra 50 ml	136102

Aplinkosauginė informacija

Schülke produktus gamina pasitelkdama ekonomiškus, pažangius, saugius ir aplinką tausojančius gamybos procesus, išlaikydama aukštus kokybės standartus.

schülke -+

Gamintojas:

Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt, Vokietija
Tel.: +49 (0) 40 - 52100 - 0
Faks.: +49 (0) 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com

APITERAPIJA

Igaliotas atstovas Lietuvoje:

UAB "APITERAPIJA"
Daugėlišio g. 32-301,
LT-09300 Vilnius, Lietuva
Tel.: 8 5 2450 415, faksas: 8 5
2706 201
El. p. adresas:
info@apiterapija.lt



EMAS
GERTUFTES
UMWELTMANAGEMENT
REG. NR. D-150-00003

